

# POBIERANIE PRÓBEK MLEKA



Wyczyść wymię i strzyk. Wykonaj przedzdajanie.



Wyczyść i zdezynfekuj koniec strzyku.



Na próbówce zapisz numer krowy, ćwiartkę i datę.



Wyciśnij mleko dwa razy i wylej je.



Trzymając próbkę pod kątem 45 stopni, napetnij ją mlekiem nie więcej niż do 2/3 objętości.



Upewnij się, że do mleka nie dostały się żadne zanieczyszczenia, a wewnętrzna część zatyczki nie jest zabrudzona.