

Protocollo in 4 semplici step




1 cartuccia consente di testare 2 vacche contemporaneamente per ottimizzare i costi e la gestione dei campioni

1.



Identifica le vacche con una conta elevata di cellule somatiche, che è un indicatore di mastite subclinica. Se è presente un'infezione, Mastatest identificherà i batteri responsabili

2.

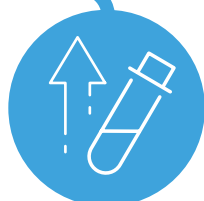

Preleva un campione di latte dei 4 quarti o da uno o più quarti già identificati con SCC elevata. Quindi versa il campione nella cartuccia

3.



Esegui il Mastatest: posiziona la cartuccia nel Lapbox, inserisci il numero della bovina e avvia il test

4.



Entro 24 ore potrai decidere se trattare o meno con antibiotico sulla base dei risultati: *S. aureus*, CNS, altri Gram+ o Gram- (Nota: non viene fornita la sensibilità agli antibiotici)

Utilizzare la cartuccia per il test HiSCC solo per testare vacche con SCC elevata. Per i casi di mastite clinica utilizzare le cartucce cliniche.

