


## JAK PRAWIDŁOWO POBRAĆ PRÓBKĘ MLEKA

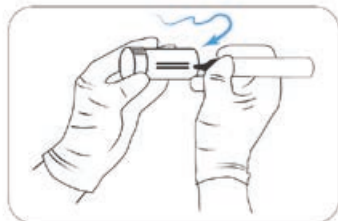

### 1 | OZNACZ

Na próbówce do pobierania mleka zapisz numer krowy, ćwiartkę i datę pobrania. Natóż czyste, jednorazowe rękawiczki.




### 2 | WYCZYŚĆ STRZYK

Przed pobraniem mleka, strzyk dokładnie wyczyść mokrą ściereczką i osusz. Następnie zanurz strzyk w preparacie do dezynfekcji. Na koniec, chusteczką nasączoną roztworem dezynfekującym przetrzyj okolicę ujścia strzyku.



### 3 | PRZYGOTUJ PRÓBÓWKĘ

Odkręć nakrętkę uważając, by nie dotknąć jej wewnętrznej powierzchni. Trzymaj nakrętkę między kciukiem, a palcem wskazującym, wewnętrzną stroną do dołu. Probówkę, do momentu rozpoczęcia pobierania mleka, również utrzymuj do góry dnem, tak by nie trafiły do niej żadne zanieczyszczenia.

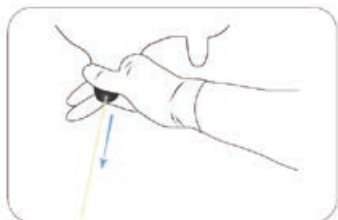

### 4 | ZDÓJ

Zdój pierwsze 2-3 strugi mleka. Mleko powinno trafić do odpowiedniego pojemnika, a następnie zostać zutyliizowane. Nie wolno zdajać bezpośrednio na podłogę czy ściótkę.



### 5 | POBIERZ MLEKO

Trzymając probówkę pod kątem 45 stopni, napełnij ją do 3/4 objętości mlekiem. Upewnij się, że do próbówki nie dostały się żadne zanieczyszczenia. Zamknij probówkę.



### 6 | DOSTARCZ PRÓBKĘ DO BADANIA

Pobraną próbkę należy jak najszybciej dostarczyć do gabinetu weterynaryjnego w celu wykonania analizy Mastatest. Jeżeli nie jest to możliwe skonsultuj się z lekarzem weterynarii i dopytaj jak odpowiednio przechować próbkę.

- Aby badanie zostało poprawnie wykonane, próbkę mleka należy pobrać czysto i nie doprowadzić do jej zanieczyszczenia.
- Używaj zawsze sterylnych probówek do pobierania mleka oraz czystych, jednorazowych rękawic.